




– Instrucciones de uso –

Descripción del producto: Los apósitos y cordeles de alginato de calcio Vitále® son altamente absorbentes, suaves y cómodos, y crean un medio ideal en la herida. Los mismos están indicados para el tratamiento de lesiones que presentan exudado de moderado a abundante al igual que en heridas profundas.

Los apósitos de alginato de calcio Vitále son esterilizados por medio de un método de transmisión de electrones, por lo que no deberán ser re-esterilizados. Las fibras de alginato de calcio reaccionan con el exudado o la sangre formando un gel hidrofílico que a su vez genera un medio ambiente húmedo en la herida. Gracias a su gran capacidad de absorción, el tiempo entre cambio de apósitos puede extenderse y realizarse fácilmente sin perjudicar el tejido de granulación. Los apósitos de alginato de calcio Vitále son ideales para heridas que se encuentran drenando debido a que reducen el riesgo de maceración del tejido circundante a la lesión. Por ser de material flexible, se facilita su uso en heridas profundas y/o perforadas.

Indicaciones: Los apósitos y las cuerdas de alginato de calcio Vitále se pueden utilizar para el manejo de heridas:

-  • Con exudado de bajo a moderado y
-  • Superficiales o
-  • Profundas
- Úlceras cutáneas
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas en la mitad inferior de la pierna
- Úlceras diabéticas
- Heridas postoperatorias

Advertencia:

- No utilizar en casos de sensibilidad conocida a los apósitos o cuerdas de alginato de calcio Vitále con plata antibacteriana o a cualquiera de sus componentes.
- Las heridas deben ser examinadas y manejadas apropiadamente, bajo la dirección de un profesional médico.

Contraindicaciones:

Su uso no está indicado en heridas secas (no exudativas o en quemaduras de tercer grado).

Efectos adversos:

Ningún efecto adverso ha sido documentado a la fecha.

Interacciones:

Ninguna interacción ha sido documentada a la fecha.

Almacenamiento:

Los apósitos y cordeles absorbentes de alginato de calcio Vitále deben ser almacenados en un área fresca y libre de humedad. El producto es estéril a menos que el paquete esté abierto o dañado.

Aplicación:

1. Limpie y enjuague la herida de manera convencional.
2. (Apósitos) Aplique el apósito de alginato de calcio Vitále sobre la herida. En caso de ser necesario, el apósito puede ser cortado o doblado para mejor ajuste en la herida.
3. (Cordel absorbente) Introduzca cuidadosamente el cordel absorbente dentro de las heridas profundas, dejando un extremo o "cola" para su fácil extracción.
4. En caso de heridas con poco exudado, humedezca el apósito con solución salina fisiológica.
5. Asegure el apósito adecuadamente.
6. Los apósitos se deben cambiar en caso de ruptura o por lo menos cada 7 días.
7. Al cambiar los apósitos, asegúrese de retirar cuidadosamente el gel que se ha formado entre el apósito y el exudado. Enjuague si es necesario.
8. Enjuague cualquier residuo de gel utilizando una sustancia adecuada para limpiar heridas. (por ejemplo, PeleVerus® Spray o solución salina fisiológica).

– Línea de productos –

Número de producto:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/caja:
20600	Apósitos de alginato de calcio Vitále	Cordel absorbente	5
20622	Apósitos de alginato de calcio Vitále	5 cm x 5 cm (2" x 2")	10
20644	Apósitos de alginato de calcio Vitále	10 cm x 10 cm (4" x 4")	10
20645	Apósitos de alginato de calcio Vitále	10 cm x 12.5 cm (4" x 5")	10



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



Descartables



Esterilizados por irradiación



Mantenga seco



Mantener alejados del calor