

## – Instrucciones de uso –

**Descripción del producto:** Los Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále® son vendajes oclusivos no adherentes de gasa impregnados con vaselina blanca. Mantienen un ambiente húmedo en la herida para ayudar con la curación. Se aferran y ajustan a los contornos del cuerpo. Utilícelo debajo de un apósito secundario, como los Apósitos de Cobertura o los Apósitos de Hidrocoloide.

La vaselina forma una barrera oclusiva que retiene la humedad en la herida y protege de la contaminación ambiental. Los Apósitos pueden cortarse o doblarse para adaptarse a la cavidad de la herida o envolverse alrededor de las extremidades. Los Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále son esterilizados por exposición a radiación gamma y no deben esterilizarse de nuevo.

### Indicaciones:

Los Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále se pueden usar para el tratamiento de heridas que son:

 **De espesor superficial a parcial**

- Lugares de incisión
- Lugares de donación y de injertos de piel

 **Secas o de exudación ligera**

- Abrasiones y quemaduras menores
- Una capa oclusiva primaria

### Precaución:

- No usar en casos de sensibilidad conocida a la vaselina.
- Las heridas deben revisarse y tratarse adecuadamente, bajo las recomendaciones de un médico.

### Contraindicaciones:

Los Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále forman un apósito oclusivo y, como tal, no están indicadas para heridas altamente exudantes.

### Efectos secundarios e interacciones:

No se han observado hasta la fecha.

### Almacenamiento:

Los Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles, a menos que se abra o se dañe el paquete.

### Aplicación:

1. Limpie y enjuague la herida con un limpiador de heridas adecuado.
2. La piel alrededor de la herida debe estar limpia y seca. Use una preparación de barrera cutánea según sea necesario.
3. Usando técnicas asépticas, retire el apósito del paquete y aplíquelo en la herida húmeda. El apósito se puede cortar a la medida. Superponga los bordes de la herida.
4. Cubra con un apósito absorbente secundario, como el Apósito de Cobertura o Compuesto, o el Apósito Hidrocoloide.
5. Cambie el apósito, según las indicaciones, cuando este se rompa, o al menos cada 7 días.

## – Línea de productos –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Tiras/Caja:
56108	Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále	1" x 8" (2.5 cm x 20 cm)	50
56309	Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále	3" x 9" (7.5 cm x 22.5 cm)	50
56318	Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále	3" x 18" (7.5 cm x 40 cm)	12
56636	Apósitos de Gasa con Vaselina Vitále	6" x 36" (15 cm x 91 cm)	12



**CellEra, LLC** CellEra, LLC Cincinnati, OH  
www.celleralc.com



No usar si el paquete está dañado



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Un solo uso

**STERILE**

Esterilizado con radiación gamma