

- Instrucciones de uso -

Descripción del producto: Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona Vitale® son absorbentes, tienen un borde de silicona no traumático, y proporcionan una cubierta ideal para lesiones de diferentes tipos. Son apósitos suaves y flexibles muy cómodos sobre la piel frágil, y tienen un tiempo de uso largo. Estos apósitos están indicados como un apósito secundario para cubrir los apósitos y tratamientos principales, o como apósito principal sobre heridas menores, lesiones cutáneas laceradas, etc. Ayudan a proteger la herida y evitan la contaminación bacteriana o la maceración.

Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona Vitale tienen una almohadilla no adherente en el centro, se mantienen firmes en el lugar gracias a la silicona con una forma especial de óvalo para permitir el paso de fluidos a la almohadilla. El adhesivo de silicona permite quitarlos de forma fácil y segura al momento del cambio, sin ocasionar un traumatismo en el paciente. La parte trasera suave y resistente está hecha de un poliuretano flexible que proporciona una barrera a prueba de agua. Esta película transpirable permite que los gases, incluido el vapor de agua, atraviesen y salgan del apósito.

Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona Vitale están disponibles en una gama de tamaños convenientes. Son esterilizados mediante óxido de etileno y no deben esterilizarse de nuevo.

Indicaciones: Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona Vitale son de único uso y se puede usar para cubrir apósitos principales y proteger distintos tipos de heridas, como las siguientes:



Superficiales o profundas




De exudación mínima a fuerte

- Llagas por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Úlceras por diabetes
- Lesiones postquirúrgicas
- Área de donación de piel
- Quemaduras de segundo grado
- Área posquirúrgica
- Lesiones y laceraciones menores


Efectos secundarios/interacciones: No se han observado hasta la fecha.

Almacenamiento: Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona Vitale deben almacenarse en un área fresca y seca. Los productos son estériles, a menos que el paquete esté abierto o dañado


Application:

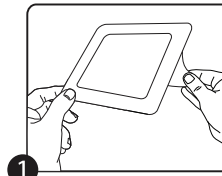

1 Primero retire la lámina central de la película protectora (o un lado para los dos tamaños más pequeños).

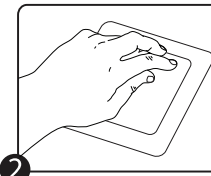

2 Coloque el centro del apósito sobre el área y adhiera un lado.

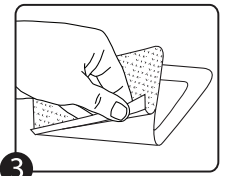

3 Retire el remanente de la película protectora y adhiera el apósito.

- Línea de productos -

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño del apósito:	Tamaño de la almohadilla:	Apósitos/caja:
24203	Apósitos compuestos de silicona Vitale	2" x 3" (5cm x 7.5cm)	1" x 1.6" (2.5cm x 4cm)	30
24204	Apósitos compuestos de silicona Vitale	3.5" x 4" (9cm x 10cm)	2" x 2.4" (5cm x 6cm)	30
24206	Apósitos compuestos de silicona Vitale	5" x 6" (12.5cm x 15cm)	3" x 4" (7.5cm x 10cm)	30
24207	Apósitos compuestos de silicona Vitale	6" x 7" (15cm x 17.5cm)	4" x 5" (10cm x 12.5cm)	30
24209	Apósitos compuestos de silicona Vitale	9" x 9" (23cm x 23cm)	6.9" x 6.9" (17.5cm x 17.5cm)	15
24704	Apósitos con cobertura de silicona Vitale	3.5" x 4" (9cm x 10cm)	2" x 2.4" (5cm x 6cm)	30
24707	Apósitos con cobertura de silicona Vitale	6" x 7" (15cm x 17.5cm)	4" x 5" (10cm x 12.5cm)	30



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com

STERILE EO Esterilizado con óxido de etileno

Un solo uso

Mantener seco

Temperatura Almacenaje
100°F
40°C
40°F
5°C

No está hecho con látex de caucho natural