

– Instrucciones de Uso –

Descripción del Producto: Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále® son extremadamente absorbentes y proporcionan un ambiente húmedo ideal para la cicatrización de heridas. Son suaves y adaptables a la piel frágil, y son eficaces para minimizar el dolor y la incomodidad.

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále están indicados para el tratamiento de heridas exudativas de ligeras a fuertes, y ayudan a proteger la herida, evitando la contaminación bacteriana y la maceración de la piel.

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále tienen 3 capas:

- 1) Una capa de silicona blanda de contacto con la herida que es adaptable para el contacto íntimo con la piel. La capa de silicona proporciona adherencia flexible a la herida y a las partes circundantes, y tiene muchos orificios para que puedan traspasar los exudados a través de la capa absorbente, controlando el exceso de humedad.
- 2) Una almohadilla absorbente hecha de fibras Súper Absorbentes, para heridas muy exudativas que ayuda a proporcionar un entorno de humedad ideal a la herida.
- 3) La película exterior impermeable pero permeable al vapor es suave y adaptable a la piel frágil.

Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále están esterilizados con óxido de etileno y no deben ser esterilizados de nuevo.

El adhesivo de silicona cubre toda la herida o cubre la superficie de contacto primario con la herida, y permite que el centro del apósito se adhiera suavemente a ella. El borde se adhiere con firmeza, pero con suavidad al tejido circundante de la herida, ayudando a prevenir la descomposición del tejido adyacente. La silicona es elástica y flexible, de modo que el vendaje se pueda despegar suavemente para la inspección.

Indicaciones: Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále son de un solo uso y pueden utilizarse como:

- Un apósito primario en contacto directo con el lecho de la herida.
- Un apósito secundario (cubierta) sobre un relleno apropiado para heridas u otro apósito primario.

Pueden utilizarse para el tratamiento de las siguientes heridas:

- Úlcera por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Campos donantes de piel
- Heridas profundas y superficiales
- Heridas exudativas ligeras a fuertes
- Úlceras diabéticas
- Quemaduras de segundo grado

Las heridas tratadas pueden tener exudado ligero a intenso, y pueden ser superficiales o profundas.

Efectos secundarios / Interacciones: No se han observado hasta la fecha.

Almacenamiento: Los Apósitos Súper Absorbentes de Silicona deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles, a menos que el empaque esté abierto o dañado

Aplicación:

1. Limpie y enjuague la herida según el protocolo habitual. El Spray Limpiador de Heridas ayuda a acondicionar y preparar el lecho de la herida para la cicatrización.
2. Utilizando la técnica estéril, tome el apósito del paquete, y retire la película de liberación del centro que expone la capa suave de silicona.
3. Coloque el apósito sobre la herida húmeda, centrando y posicionando la almohadilla en la herida. La capa de contacto de silicona blanda es tan flexible que puede adherirse directamente al lecho de la herida.
4. Cuando se usa como apósito secundario, aplique el apósito primario o el relleno de heridas al lecho de la herida, según las instrucciones de uso de ese producto. Luego aplique los Apósitos de Silicona Vitale retirando la película de liberación del centro y aplicándolos en el centro de la herida.
5. Retire la película de liberación del borde y adhiéralo al tejido circundante de la herida. No estire el apósito mientras se aplica.
6. Si la almohadilla absorbente se satura, los exudados se filtrarán lateralmente a la almohadilla absorbente y podrán observarse en el borde. Cuando esto ocurre, el apósito debe cambiarse.
7. Cambie el vendaje como se indica, cuando la almohadilla absorbente esté saturada, o por lo menos cada 7 días.

Los apósitos pueden permanecer en su lugar durante 1-7 días, según las características de la herida y la cantidad de drenaje.

– Línea de Productos –

Número de Catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Tamaño Almohadilla	Apósitos/Caja
20234	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále	3,5" x 4"	1,8" x 2,4"	10
20245	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále	4.75" x 5.5"	3" x 3.5"	10
20267	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále	6" x 7"	4" x 5"	10
20280	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Vitále	8" x 10"	5,5" x 7,5"	10
20290	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Sacra Vitále	6,8" x 7"	5" x 4,8"	5
20292	Apósitos Súper Absorbentes de Silicona Sacra Vitále	6" x 5,8"	3,8" x 4"	10



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado por exposición a óxido de etileno



No fabricado con látex de caucho natural