

# VITÁLE®

## Collagen Powder

Polvo de Colágeno

### – Instrucciones de uso –

**Descripción del producto:** Vitále® Collagen Powder Dressings es un producto de rellenos absorbentes para heridas fabricado a partir de colágeno microfibrilar tipo 1 para el tratamiento de heridas con exudado de carácter leve a severo y heridas crónicas y el control de sangrado menor. Vitále Collagen Powder Dressing forma un gel al contacto con el exudado que proporciona un entorno húmedo y fisiológicamente favorable para propiciar la cicatrización de heridas. Vitále Collagen Powder Dressing se aplica directamente a la herida para actuar como relleno de la herida y para absorber el exudado y los componentes del exudado que pueden afectar la cicatrización de la herida.

Vitále Collagen Powder Dressings se esteriliza mediante exposición a la radiación gamma y no debe volver a esterilizarse. El apósito es un polvo suelto blanquecino empacado en convenientes paquetes de un solo uso, estériles, de fácil apertura, que contiene 1 gramo de polvo. Después de su uso, deseche el paquete y el producto sin utilizar mediante el protocolo de desecho de la instalación.

**Indicaciones:** El apósito en polvo de colágeno Vitále está indicado para el tratamiento de heridas con exudación de moderada a intensa y para controlar hemorragias leves. El apósito en polvo de colágeno Vitále se puede utilizar para el tratamiento de heridas exudativas como:



Superficial o Profundo



Heridas con exudación de moderada a abundante

- Úlceras por presión
- Úlceras por estasis venosa
- Úlceras diabéticas
- Heridas agudas, por ejemplo heridas traumáticas y quirúrgicas
- Quemaduras de espesor parcial

#### Precaución:

Vitále Collagen Powder Dressing fue formulado para uso tópico solamente. Evite la inhalación y enjuague inmediatamente con agua si el producto entra en contacto con los ojos.

#### Contraindicaciones:

Vitále Collagen Powder Dressings no debe usarse en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas al colágeno bovino.

#### Aplicación:

1. Limpie la herida con suero fisiológico estéril mediante el protocolo clínico existente. Seque la piel circundante con suavidad.
2. Abra el paquete de Vitále y aplique suficiente polvo para asegurar aproximadamente ¼" de profundidad de cobertura del lecho de la herida. No sobrecargue ni comprima el polvo, ya que puede expandirse a medida que absorbe el exudado de la herida.
3. Elija y aplique un apósito secundario apropiado o cubra con un apósito absorbente para asegurar y proteger el polvo de colágeno.
4. Cambie los apósitos diariamente, según las indicaciones, cuando estén completamente saturados o de acuerdo con la política de cambio de las instalaciones, pero al menos cada 7 días.
5. Al cambiar, retire el apósito secundario y retire suavemente el gel formado por el apósito y el exudado. Limpie la herida con suero fisiológico estéril mediante el protocolo clínico existente. Seque la piel circundante con suavidad.

La Ley Federal (EE. UU.) restringe la venta y el uso de este dispositivo bajo la dirección de médicos autorizados y profesionales de la salud con licencia

### – Línea de productos –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/Caja:
22000	Vitále Collagen Powder Dressings	1 g/paquete	10




CellEra, LLC Cincinnati, OH  
www.celleralc.com

STERILE | R Estéril

⊗ Un solo uso

Rx Solo Rx

☂ Mantener alejado del calor

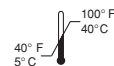

40° F / 5° C - 100° F / 40° C  
Temperatura de almacenamiento



Mantener seco



No está hecho con látex de caucho natural