

– Instrucciones de uso –

Descripción del producto: Los apósitos de colágeno Vitále® son apósitos absorbentes para heridas fabricados con colágeno microfibrilar de tipo 1, destinados al tratamiento de heridas agudas y crónicas con exudado mínimo o intenso y al control de hemorragias menores. Los apósitos de colágeno forman un gel en contacto con el exudado que proporciona un entorno húmedo y fisiológicamente favorable para estimular la cicatrización de la herida. Los apósitos de colágeno Vitále se aplican directamente sobre la herida para absorber el exudado y sus componentes que pueden perjudicar la cicatrización de la herida, y para funcionar como agente hemostático a fin de controlar pequeñas hemorragias.

Los apósitos de colágeno Vitále se esterilizan por exposición a la radiación gamma y no deben volver a esterilizarse. El apósito es una lámina de color blanquecino, en varios tamaños, envasada en cómodos paquetes desechables, estériles, que contienen 1 apósito. Después de utilizarlo, deseche el envase abierto y el producto no utilizado según el protocolo de residuos del establecimiento.

Indicaciones: Los apósitos de colágeno Vitále están indicados para el tratamiento de heridas agudas y crónicas de mínima a gran exudación, que incluyen:



Superficial o profundas

- Úlceras de presión
- Úlceras por estasis venosa
- Úlceras de pie diabético.



Exudación de mínima a fuerte

- Lesiones traumáticas, quirúrgicas y dehiscencia por herida.
- Quemaduras de segundo grado

Los apósitos de colágeno Vitále también están indicados para el control de hemorragias menores, incluso después de un desbridamiento.

Precauciones: Solo para uso tópico. No apto para uso oftálmico. Evitar el contacto con los ojos.

Contraindicaciones: Los apósitos de colágeno Vitále no deben utilizarse en pacientes con sensibilidad o alergia conocida al colágeno bovino.

Aplicación:

1. Limpie la herida con suero fisiológico estéril mediante el protocolo clínico existente. Seque la piel circundante con suavidad.
2. Elegir y aplicar el apósito secundario adecuado, como los apósitos de cobertura o compuestos Vitále, los apósitos hidrocoloides Vitále, etc.
3. Cambie los apósitos diariamente, según las indicaciones, cuando estén completamente saturados o según la política de cambio del establecimiento, como máximo cada 7 días.
4. Cuando se cambie, retire el apósito secundario y elimine suavemente el gel formado por el apósito y el exudado. Limpie la herida con suero fisiológico estéril mediante el protocolo clínico existente. Seque la piel circundante con suavidad.

Advertencias: Puede observarse un aumento de la secreción en los primeros días de tratamiento. Se han notificado algunas reacciones (dolor transitorio, hemorragia, ampollas, hinchazón o enrojecimiento) en casos aislados utilizando un producto similar. Si estas condiciones continúan durante más de 3 a 5 días, suspenda el uso del producto e informe al médico.

La Ley Federal (EE.UU.) restringe la venta y el uso de este dispositivo a las indicaciones de los médicos autorizados y los profesionales de la salud con licencia.

– Línea de productos –

Número de catálogo::	Descripción:	Tamaño:	Apósitos por caja::
22011	Apósitos de colágeno Vitále	1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)	10
22022	Apósitos de colágeno Vitále	2" x 2" (5 x 5 cm)	10
22044	Apósitos de colágeno Vitále	4" x 4" (10 x 10 cm)	10
22077	Apósitos de colágeno Vitále	7" x 7" (18 x 18 cm)	10

Made in USA for




CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com

STERILE | R Esterilizado

De un solo uso

R_x Venta bajo receta

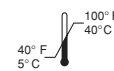

Temperatura de almacenamiento



Preservar de la humedad



Proteger del calor