

– Instrucciones de Uso –

Descripción del Producto:

Los Apósitos de Vitále® Composición Postoperatorios son absorbentes, tienen un borde adhesivo y proporciona una cobertura ideal para las heridas de muchos tipos. Son preparaciones suaves y flexibles que son muy cómodas en la frágil piel y tienen un tiempo largo de desgaste. Estos apósitos están indicados para cubrir apósitos de tratamiento primario y ayudan en la protección de la herida, evitando la maceración y contaminación bacteriana.

La composición tiene la misma construcción y brinda resistencia al agua aún con su capa permeable al vapor para proporcionar protección. Puede ser utilizado en áreas del cuerpo afectadas por incontinencia para mantener la herida limpia, o usar durante la ducha o el baño sobre las heridas atendidas. La capa transpirable permite la salida de exceso de gases.

Los Apósitos de Vitále Composición Postoperatorios están disponibles en varios tamaños convenientes. Están esterilizados por radiación y no deben ser esterilizados de nuevo.

Indicaciones:

Los Apósitos de Vitále de Composición Postoperatorios son para un solo uso y se puede utilizar para cubrir apósitos primarios y para proteger muchos tipos de heridas:



Superficial o Profunda

- Heridas postoperatoria
- Sitio donante



Heridas moderadas a profusamente colonizadas


- Quemaduras de segundo grado
- Sitios Postoperatorio
- Llagas por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Úlceras diabéticas

Efectos secundarios/interacciones: No se han observado hasta la fecha.


Almacenamiento:

Los Apósitos de Vitále Composición Postoperatorios se deben almacenar en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que se abra o el paquete se dañe.


Aplicación:

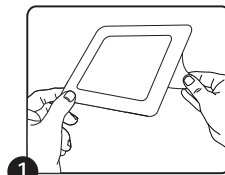

1 Primero, elimine un lado del respaldo de papel.

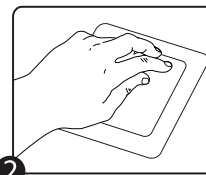

2 Coloque el centro del apósito sobre la herida y sujete un lado.

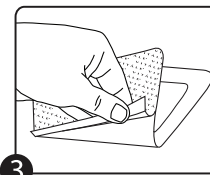

3 Retire el resto del respaldo de papel y sujete.

– Línea de Productos –

Número de Catálogo: Descripción:

24106	Apósito de Vitále Composición Postoperatorios
24110	Apósito de Vitále Composición Postoperatorios
24114	Apósito de Vitále Composición Postoperatorios

Tamaño:

4"x6" (10cm x 15cm)
4"x10" (10cm x 25cm)
4"x14" (10cm x 35cm)

Apósito/Caja:

30
30
15



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con radiación gamma



No fabricado con látex de caucho natural