

– Instrucciones de Uso –

Descripción del Producto: Los Apósitos Hidrocoloides Vitále® (Estándar y Delgado) son apósitos adhesivos para contacto con heridas y ahora están hechos de una fórmula especial para eliminar olores. La capa adhesiva contiene polímeros que mejoran la capacidad del apósito para contener el exudado de la herida al formar un gel cohesivo. Los Apósitos Hidrocoloides Vitále absorben el fluido de la herida y proporcionan un ambiente húmedo que apoya el proceso de curación del cuerpo y promueve el desbridamiento autolítico (eliminación del material necrótico de la herida) sin dañar el nuevo tejido. Cuando se humedece con fluidos corporales, se reduce el nivel de adhesión al tejido de la herida, lo que permite una fácil extracción del apósito y los exudados contenidos.

Los Apósitos Hidrocoloides Vitále (Estándar) proporcionan una capacidad de absorción superior en un apósito hidrocoloide de espesor estándar, y tienen bordes cónicos para disuadir el “enrollamiento”. Los Apósitos Hidrocoloides Delgados de Vitále proporcionan una excelente absorción en un apósito “extradelgado” que es altamente flexible y cómodo. Los Apósitos Hidrocoloides Delgados de Vitále son adecuados para áreas sujetas a fricción y/o que requieren contornearse, por ejemplo codos, talones.

Todos los Apósitos Hidrocoloides de Vitále tienen una capa externa flexible resistente al agua, que actúa como una barrera contra la herida contra la contaminación bacteriana, viral u otra externa. Esto minimiza el potencial de exposición a agentes nosocomiales o infecciosos.

Todos los Apósitos Hidrocoloides de Vitále se pueden usar solos o en combinación con otros productos para el cuidado de heridas según las indicaciones de su profesional de la salud. Los Apósitos Hidrocoloides de Vitále se esterilizan por irradiación y no se deben volver a esterilizar. Los productos son estériles a menos que el empaque esté abierto o dañado. Los Apósitos Hidrocoloides de Vitále son de un solo uso.

Precaución:

- No utilizar en casos de sensibilidad conocida a los Apósitos Hidrocoloides Vitále o cualquiera de sus componentes.
- No utilizar los Apósitos Hidrocoloides Vitále en úlceras que involucren músculos, tendones o huesos.
- Los Apósitos Hidrocoloides Vitále deben usarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.
- Los Apósitos Hidrocoloides Vitále se pueden usar en heridas infectadas bajo supervisión médica y con terapia apropiada y monitoreo frecuente.

Indicaciones:

Los Apósitos Hidrocoloides Vitále se pueden usar para heridas que son:



**Superficiales
a Profundas**



**Exudado bajo
a moderado**

- Laceraciones por Presión
- Úlceras Arteriales
- Úlceras venosas de la parte inferior de la pierna
- Úlceras Diabéticas
- Heridas Postoperatorias

Aplicación:

Preparando la herida: Limpie la herida cuidadosamente con un limpiador de heridas como Vitále® Wound Cleanser Spray o solución salina según el protocolo clínico existente. La piel que rodea la herida debe estar limpia y seca.

Aplicando el Apósito: Seleccione un apósito que se extienda aproximadamente 1" sobre la piel intacta. Si es necesario, doble o corte para ajustar al tamaño de la herida. Retire con cuidado el papel desprendible de la cara del apósito. Aplique el centro del apósito al centro de la herida, utilizando una técnica limpia.

Presione suavemente, conformando el apósito en el área de la herida y cualquier pliegue o arruga. Tenga cuidado de no estirar el apósito. El apósito se vuelve más flexible a medida que absorbe el calor del cuerpo.

Revise los bordes del apósito para asegurarse de que estén bien adheridos.

Cambiando el Apósito: Cambiar semanalmente, o con mayor frecuencia, según sea necesario. Cambie cuando el apósito esté saturado con fluidos corporales, si se observan fugas o exudados, o si el sello oclusivo está roto. Si se usan Apósitos Hidrocoloides de Vitále en presencia de tejido necrótico, la herida puede parecer que aumenta de tamaño y profundidad durante la autólisis. Esta es una consecuencia normal del tratamiento oclusivo.

Enjuague con un limpiador de heridas como Vitále® Wound Cleanser Spray o solución salina antes de evaluar la herida y aplicar un nuevo apósito.

– Línea de Productos –

Número de Catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/Caja:
21044	Apósitos Hidrocoloides Vitále Delgados	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	10
21222	Apósitos Hidrocoloides Vitále, Borde Cónico	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	10
21244	Apósitos Hidrocoloides Vitále, Borde Cónico	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	10
21290	Apósitos Hidrocoloides Vitále Sacros, Borde Cónico	6" x 7" (15 cm x 18 cm)	5



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



Un Solo Uso

STERILE | R

Estéril



Mantener
Seco



Temperatura
de Almacenamiento

100°F
40°C
40°F
5°C