

– Instrucciones de Uso –

Descripción del Producto: Los Apósitos y Cordones de Alginato de Calcio Vitále® STRONG™ son muy fuertes, altamente absorbentes, suaves y conformables. Crean un ambiente ideal para heridas y están indicados para el tratamiento de heridas moderadas a muy exudadas y heridas superficiales o profundas.

Las fibras de alginato de calcio de Vitále STRONG reaccionan con exudados de heridas o sangre y forman un gel hidrofílico que crea un ambiente húmedo para las heridas. La absorción superior extiende el tiempo de uso, y el apósito sale de una pieza al cambiar el apósito sin alterar el tejido de granulación. Los Apósitos de Alginato de Calcio de Vitále STRONG son ideales para drenar heridas, ya que reducen el riesgo de maceración en la piel circundante. La flexibilidad de los apósitos y cordones facilita su uso en cavidades o heridas tunelizadas.

Los Apósitos de Alginato de Calcio de Vitále STRONG se esterilizan mediante esterilización con haz de electrones y no deben volver a esterilizarse.

Indicaciones: Los Apósitos y Cordones de Alginato de Calcio de Vitále STRONG se pueden utilizar para el tratamiento de heridas:

- | | | |
|--|------------------------------|---|
|  | Superficiales
o Profundas | <ul style="list-style-type: none"> • Úlceras de decúbito • Úlceras Arteriales • Úlceras venosas de la parte inferior de la pierna • Úlceras diabéticas • Heridas Postoperatorias |
|  | Exudado Moderado
a Denso | |

Precaución:

- No usar en casos de sensibilidad conocida a los Apósitos o Cordones de Alginato de Calcio de Vitále STRONG o a cualquiera de sus componentes.
- Las heridas deben revisarse y manejarse adecuadamente, bajo la dirección de un médico.

Contraindicaciones:

No indicado para condiciones de heridas secas o para quemaduras de tercer grado.

Efectos Secundarios:

Ninguno ha sido observado hasta la fecha.

Interacciones:

Ninguna ha sido observada hasta la fecha.

Almacenamiento:

Los Apósitos y Cordones de Alginato de Calcio de Vitále STRONG deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a menos que el empaque esté abierto o dañado.

Aplicación:

1. Limpie y enjuague la herida de la manera habitual.
2. (Apósitos) Coloque el Apósito de Alginato de Calcio Vitále STRONG sobre la herida húmeda. Si es necesario, doble o corte para ajustar el tamaño de la herida.
3. (Cordones) Enrolle el cordón suavemente en la cavidad de las heridas dejando un extremo o "cola" para una fácil extracción.
4. En caso de heridas ligeramente exudantes, use Apósitos de Alginato de Calcio Vitále normales.
5. Asegure el apósito cubriendo con un apósito impermeable semi-oclusivo.
6. Cambio de apósito según las instrucciones, cuando ocurre un calado, o al menos cada 7 días.
7. Al cambiar el apósito, retire la retención del apósito y retire suavemente el gel formado por el apósito y el exudado. Si alguna porción del apósito está seca, enjuague con solución salina para humedecer todo el apósito antes de retirarlo.

– Línea de producto –

Número de Catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/Caja:
20650	Cordones de Alginato de Calcio Vitále STRONG		5
20652	Apósitos de Alginato de Calcio Vitále STRONG	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	10
20654	Apósitos de Alginato de Calcio Vitále STRONG	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	10
20655	Apósitos de Alginato de Calcio Vitále STRONG	4" x 5" (10 cm x 12.5 cm)	10
20658	Apósitos de Alginato de Calcio Vitále STRONG	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	5

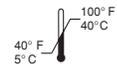


CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com

STERILE Estéril

 Un Solo Uso

 Mantener Seco

 Temperatura de Almacenamiento

 Sin Látex Natural