

– Instrucciones de uso –

Descripción del producto: Los apósitos de fibra gelificante Vitale® STRONG™ son almohadillas o cuerdas suaves, moldeables y no tejidas compuestas de fibras de carboximetilcelulosa (CMC), polietileno de alta densidad y fibras de tereftalato de polietileno (PET). Este apósito moldeable y altamente absorbente absorbe el líquido de la herida y crea un gel suave, proporcionando un entorno húmedo ideal para la cicatrización de la herida, y ayuda a eliminar el material innecesario de la herida (desbridamiento autolítico), sin dañar el tejido recién formado.

Indicaciones:

Los apósitos y cuerdas de fibras gelificantes Vitale STRONG pueden utilizarse para el tratamiento de heridas crónicas y agudas con una exudación moderada a intensa. Se trata de un apósito primario y debe utilizarse con un apósito secundario.



Superficial o profundo

- Llagas por presión
- Úlceras venosas de la parte inferior de la pierna



Exudado moderado a abundante

- Úlceras diabéticas
- Heridas postoperatorias
- Sitios donantes
- Heridas traumáticas

Precaución:

Los apósitos de fibra gelificante Vitale STRONG no deben usarse en personas que son sensibles o que han tenido una reacción alérgica al apósito o a sus componentes.

Estos Apósitos se esterilizan mediante exposición a la radiación del haz de electrones y no se deben reutilizar ni reesterilizar.

Instrucciones de uso:

- Limpie y enjuague el área de la herida utilizando el protocolo aprobado por el centro.
- (Apósitos) Aplique el apósito a la herida húmeda. Si es necesario, doble o corte el apósito para ajustarlo al tamaño de la herida.
- (Cuerdas) enrolle la cuerda suavemente para llenar las heridas de la cavidad dejando un extremo o “cola” para una extracción fácil.
- Si la herida está seca o mínimamente húmeda, moje el apósito antes de cubrirla para garantizar un ambiente húmedo en la herida.
- Cubra la herida con un tipo y tamaño adecuados de apósito oclusivo o semioclusivo, como un apósito de cobertura o compuesto, o apósito de silicona superabsorbente para heridas con drenaje abundante
- Todas las heridas deben inspeccionarse con frecuencia. Retire el apósito cuando esté indicado clínicamente (es decir, goteo, sangrado excesivo, aumento del dolor) o después de un máximo de 7 días.
- Cambie el apósito según lo indicado, pero al menos cada 7 días.
- Al cambiar el apósito, elimine la retención y retire con cuidado el gel formado por el apósito y el exudado. Si alguna parte del apósito está seca, enjuague con solución salina para humedecer todo el apósito antes de quitarlo. Cualquier residuo de gel debe eliminarse al limpiar la herida.

– Línea de producto –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos/caja:
20670	Cuerdas de fibra gelificante Vitale STRONG	.8"x12" (2 cm x 30 cm)	5
20672	Apósitos de fibra gelificante Vitale STRONG	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	10
20674	Apósitos de fibra gelificante Vitale STRONG	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	10
20675	Apósitos de fibra gelificante Vitale STRONG	4" x 5" (10 cm x 12.5 cm)	10
20676	Apósitos de fibra gelificante Vitale STRONG	6" x 6" (15 cm x 15 cm)	5
20678	Apósitos de fibra gelificante Vitale STRONG	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	5



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



No utilizar si el paquete está dañado



Un solo uso



Manténgase seco



Temp. de almacenamiento
41°F / 5°C to 86°F / 30°C

STERILE Radiación E esterilizada



No fabricado con látex de caucho natural