

– Instrucciones de uso –

Descripción del producto: Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona postoperatorios Vitale® son absorbentes, tienen un borde de silicona adhesivo no traumático, y proporcionan una cubierta ideal para lesiones de carácter quirúrgico. Son apósitos suaves y flexibles muy cómodos sobre la piel frágil, y tienen un tiempo de uso largo. Estos apósitos están indicados como un apósito secundario para cubrir los apósitos y tratamientos principales, o como apósito principal sobre incisiones posquirúrgicas. Ayudan a proteger la herida y evitan la contaminación bacteriana o la maceración.

Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona postoperatorios Vitale tienen una almohadilla no adherente en el centro, se mantienen firmes en el lugar gracias a la silicona con una forma especial de óvalo para permitir el paso de fluidos a la almohadilla. El adhesivo de silicona permite quitarlos de forma fácil y segura al momento del cambio, sin ocasionar un traumatismo en el paciente. La parte trasera suave y resistente está hecha de un poliuretano flexible que proporciona una barrera a prueba de agua. Esta película transpirable permite que los gases, incluido el vapor de agua, atraviesen y salgan del apósito.

Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona postoperatorios Vitale están disponibles en una gama de tamaños convenientes. Son esterilizados mediante óxido de etileno y no deben esterilizarse de nuevo.

Indicaciones: Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona postoperatorios Vitale son de único uso y se los puede usar para cubrir apósitos principales y proteger distintos tipos de heridas, como las siguientes:



Superficiales o profundas




De exudación mínima a fuerte

- Heridas postoperatorias
- Área de donación de piel
- Quemaduras de segundo grado
- Área posquirúrgica
- Lesiones y laceraciones menores
- Llagas por presión
- Úlceras arteriales
- Úlceras venosas
- Úlceras por diabetes


Efectos secundarios/interacciones: No se han observado hasta la fecha.

Almacenamiento: Los apósitos con cobertura de silicona y apósitos compuestos de silicona postoperatorios Vitale deben almacenarse en un área fresca y seca. Los productos son estériles, a menos que el paquete esté abierto o dañado.


Application:

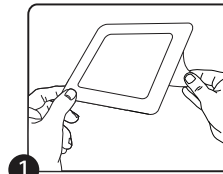

1 Primero retire un lado del empaque.

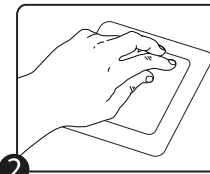

2 Coloque el centro del apósito sobre el área y adhiera un lado.

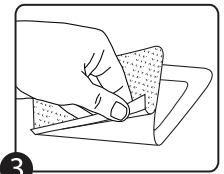

3 Retire el remanente de la película protectora y adhiera el apósito.

– Línea de productos –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño del apósito:	Apósitos/caja:
24406	Apósitos Compuestos de Silicona Postoperatorios Vitale	4"x6" (10cm x 15cm)	30
24410	Apósitos Compuestos de Silicona Postoperatorios Vitale	4"x10" (10cm x 25cm)	30
24414	Apósitos Compuestos de Silicona Postoperatorios Vitale	4"x14" (10cm x 35cm)	15

STERILE | EO Esterilizado con óxido de etileno



Un solo uso



Temperatura Almacenaje
100° F
40° C



Mantener seco



No está hecho con látex de caucho natural

