

## – Instrucciones de uso –

**Descripción del producto:** Los apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále® utilizan un adhesivo de silicona para que la remoción del apósito sea segura y cómoda. Brindan una cobertura protectora a prueba de humedad para las lesiones cutáneas laceradas, a fin de que la piel lacerada se mantenga en su lugar y pueda sanar, como también para ayudar a prevenir las infecciones. La almohadilla absorbente no se adhiere, por lo que la sangre coagulada no se pegará. El borde puede adherirse con firmeza a la piel mediante los bordes de silicona, y los apósitos son transpirables para permitir que cualquier sangrado pueda coagular.

Los apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále están disponibles en una gama de tamaños convenientes. Son esterilizados mediante óxido de etileno y no deben esterilizarse de nuevo.

**Indicaciones:** Las lesiones cutáneas laceradas en las que se haya retirado la epidermis y la dermis deben tratarse con apósitos de cuidado para heridas avanzadas luego de la evaluación de consulta con un médico o enfermero. Las lesiones cutáneas laceradas que tienen un espesor total o que tienen menos del 75 por ciento de la epidermis disponible para cubrir la herida deben evaluarse y tratarse de forma similar.

Las lesiones cutáneas laceradas que tienen más del 75 por ciento de cobertura de la epidermis lesionado son el caso ideal para los apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále. Esto debería representar las lesiones cutáneas laceradas más comunes en el entorno de cuidados a largo plazo.

**Efectos secundarios/interacciones:** No se han observado hasta la fecha.

**Almacenamiento:** Los apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále deben almacenarse en un área fresca y seca. Los productos son estériles, a menos que el paquete esté abierto o dañado.

### Aplicación:

1. Si el colgajo de piel debido a la lesión cutánea lacerada está "suelto", acerque el tejido suelto para que el colgajo de piel quede en su posición original.
2. Abra el paquete estéril mediante la técnica estéril establecida y retire el producto del paquete.
3. Sostenga el "lado de la lengüeta" (lado adhesivo) hacia usted, agarre el apósito desde un borde de la lengüeta y quite una de las láminas removibles. (Nota: los apósitos más pequeños tienen dos láminas removibles; los más grandes, 3, y la primera en quitarse es la del centro).
4. Mi mira el lado del paciente del apósito, debería ver una forma ovalada de "objetivo" en el centro del apósito formada por el adhesivo de silicona transparente y la almohadilla absorbente en el centro. Este óvalo representa el área del apósito que absorberá sangre y otros fluidos. Con el apósito en la misma posición, coloque el lado adhesivo sobre el área lastimada, centrado en la lesión cutánea lacerada o el moretón púrpura, y asegúrese de que el óvalo cubra el corte; y adhiéralo suavemente a la piel.
5. Quite las láminas removibles restantes para exponer la totalidad del lado adhesivo sobre la piel, y, suavemente, adhiera todo el apósito a esta.
6. Cambie el apósito todos los días, en caso de que se junte sangre debajo de la superficie y tenga un tamaño mayor a la lesión, si el apósito comienza a levantarse en los bordes, o luego de bañarse/ducharse. Tenga cuidado y quite el apósito suavemente en la dirección que no dañe ninguna costra que se haya formado ni ningún colgajo de piel que se esté intentando readherir.

## – Línea de productos –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño del apósito:	Tamaño de la almohadilla:	Apósitos/caja:
20923	Apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále	2" x 3" (5cm x 7.5cm)	1" x 1.6" (2.5cm x 4cm)	10
20934	Apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále	3.5" x 4" (9cm x 10cm)	2" x 2.4" (5cm x 6cm)	10
20937	Apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále	3.5" x 7" (9cm x 17.5cm)	2" x 5" (5cm x 12.5cm)	10
20956	Apósitos de silicona para lesiones cutáneas laceradas Vitále	5" x 6" (12.5cm x 15cm)	3" x 4" (7.5cm x 10cm)	10



CellEra, LLC Cincinnati, OH  
www.celleralc.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado por exposición a óxido de etileno



No fabricado con látex de caucho natural