

### – Instrucciones de Uso –

**Descripción del producto:** Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále® son vendajes oclusivos no adherentes hechos de malla de gasa fina, impregnada con Xeroformo al 3% (tribromofenato de bismuto) en vaselina. Se utilizan como apósitos primarios para mantener un ambiente húmedo en la herida. Se adhieren y se ajustan a los contornos del cuerpo. Utilícelo debajo de un apósito absorbente secundario, como los Apósitos de Cobertura o Compuestos de Vitále®, o los Apósitos de Hidrocoloide de Vitále.

La vaselina forma una barrera oclusiva que retiene la humedad en la herida y protege de la contaminación ambiental. Los Apósitos pueden cortarse o doblarse para adaptarse a la cavidad de la herida, o envolverse alrededor de las extremidades. Una sola capa proporciona una cobertura efectiva. Las Tiras de Gasa con Vaselina Vitále son esterilizadas por exposición a radiación gamma y no deben esterilizarse de nuevo.

**Indicaciones:**

Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále se pueden usar para el tratamiento de heridas que son:



**De espesor superficial a parcial**

- Lugares de incisión
- Lugares de donación y de injertos de piel



**Secas o de exudación ligera**

- Abrasiones y quemaduras menores
- Una capa oclusiva primaria

**Precaución:**

- No usar en casos de sensibilidad conocida a la vaselina o al tribromofenato de bismuto.
- Las heridas deben revisarse y tratarse adecuadamente, bajo las recomendaciones de un médico.

**Contraindicaciones:**

Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále forman un apósito oclusivo y, como tal, no están indicadas para heridas altamente exudantes. Se deben tomar precauciones cuando hay antecedentes de atopía.

**Efectos secundarios e interacciones:**

La irritación es poco común, pero puede desarrollarse si hay una sensibilidad al tribromofenato de bismuto, o si el paciente tiene antecedentes de reacciones atópicas.

**Almacenamiento:**

Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles, a menos que se abra o se dañe el paquete.

**Aplicación:**

1. Limpie y enjuague la herida con un limpiador de heridas adecuado, como el Spray Limpiador de Heridas Vitále.
2. La piel alrededor de la herida debe estar limpia y seca. Use una preparación para la barrera cutánea, como las Toallitas Protectoras para la Piel Vitále, según sea necesario.
3. Usando técnicas asépticas, retire el apósito del paquete y aplíquelo en la herida húmeda. El apósito se puede cortar a la medida. Superponga los bordes de la herida.
4. Cubra con un apósito absorbente secundario, como el Apósito de Cobertura o Compuesto, o el Apósito Hidrocoloide de Vitále.
5. Cambie el apósito, según las indicaciones, cuando este se rompa, o al menos cada 7 días.

### – Línea de Productos –


Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Tiras/Caja:
57108	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	1" x 8" (2.5 cm x 20 cm)	50
57202	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	25
57404	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	25
57509	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	5" x 9" (12.5 cm x 22.5 cm)	50



CellEra, LLC Cincinnati, OH  
www.cellerallc.com

**STERILE | R** Estéril

Un solo uso

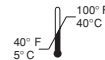

Temperatura de almacenamiento



Mantener secas