

– Instrucciones de Uso –

Descripción del producto: Los Apósitos de Emulsión de Aceite no Adherente Vitále® son vendajes primarios semioclusivos hechos de malla de gasa impregnada con una mezcla de emulsión de aceite. Mantienen un ambiente húmedo en la herida para ayudar con la curación, mientras que permiten que la exudación pase a través de ellos. Se adhieren y se ajustan a los contornos del cuerpo. Utilícelos debajo de un apósito secundario, como los Apósitos de Cobertura o los Apósitos de Hidrocoloide.

La mezcla de emulsión de aceite ayuda a prevenir la adherencia del apósito, mientras que forma una barrera semioclusiva, permitiendo que pase el exceso de exudación en la herida para ser absorbido por el apósito secundario. Los apósitos pueden cortarse o doblarse para adaptarse a la cavidad de la herida o envolverse alrededor de las extremidades. Los Apósitos de Emulsión de Aceite Vitále son esterilizados por exposición a radiación gamma y no deben estilizarse de nuevo.

Indicaciones:

Los apósitos de Emulsión de Aceite No Adherente Vitále se pueden usar como apósitos primarios para heridas que son:



De espesor superficial a total



Secas o de exudación alta

- Lugares de incisión
- Lugares de donación y de injertos de piel
- Abrasiones y quemaduras menores
- Úlceras venosas y por presión
- Grapas, líneas de sutura y laceraciones

Precaución:

- No usar en casos de sensibilidad conocida al apósito y sus componentes.
- Las heridas deben revisarse y tratarse adecuadamente, bajo las recomendaciones de un médico.

Efectos secundarios e interacciones:

No se han observado hasta la fecha.

Almacenamiento:

Los Apósitos de Emulsión de Aceite Vitále deben almacenarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles, a menos que se abra o se dañe el paquete.

Aplicación:

1. Limpie y enjuague la herida con un limpiador de heridas adecuado.
2. La piel alrededor de la herida debe estar limpia y seca.
3. Usando técnicas asépticas, retire el apósito del paquete y aplíquelo en la herida húmeda. El apósito se puede cortar a la medida. Superponga los bordes de la herida.
4. Cubra con un apósito absorbente secundario, como el Apósito de Cobertura o Compuesto, o el Apósito Hidrocoloide.
5. Cambie el apósito según las indicaciones, cuando este se rompa, o al menos cada 7 días.

– Línea de Productos –

| Número de catálogo: | Descripción: | Tamaño: | Tiras/Caja: |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 58303 | Apósitos de Emulsión de Aceite Vitále | 3" x 3" (7.5 cm x 7.5 cm) | 50 |
| 58308 | Apósitos de Emulsión de Aceite Vitále | 3" x 8" (7.5 cm x 20 cm) | 24 |
| 58316 | Apósitos de Emulsión de Aceite Vitále | 3" x 16" (7.5 cm x 40 cm) | 36 |
| 58509 | Apósitos de Emulsión de Aceite Vitále | 5" x 9" (12.5 cm x 22.5 cm) | 12 |



CellEra, LLC CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento
40° F / 5° C to 100° F / 40° C



Esterilizado con radiación gamma



No fabricado con látex de caucho natural