

– Instrucciones de Uso –

Descripción del producto: Los apósitos de vaselina Xeroform Vitále® son apósitos oclusivos no adherentes hechos de gasa de malla fina impregnada con un 3% de xeroformo (tribromofenato de bismuto) en vaselina. Los apósitos Xeroform son dispositivos estériles de un solo uso.

Indicaciones:

Los apósitos de vaselina Xeroform están diseñados para usarse como una capa de contacto principal para cubrir heridas tales como laceraciones, sitios de injertos de piel, heridas recién suturadas, abrasiones y quemaduras menores o de espesor parcial. También se pueden utilizar como capa inicial en heridas por presión con exudado ligero.

 **De espesor superficial a parcial**

- Lugares de incisión
- Lugares de donación y de injertos de piel

 **Secas o de exudación ligera**

- Abrasion y quemaduras menores
- Una capa oclusiva primaria

Contraindicaciones:

1. No lo use en pacientes con hipersensibilidad al tribromofenato de bismuto.
2. Se debe tener precaución cuando hay antecedentes de atopia.
3. No lo use en heridas que supuran mucho

Advertencias:

1. No lo use si el paquete de la unidad está abierto o dañado.
2. Evitar múltiples capas que pueden dar lugar a la maceración.
3. Suspenda su uso si se desarrolla irritación.
4. Evite usar apósitos en exceso y la presión resultante sobre la herida.

Reacciones adversas:

La irritación, aunque rara, puede desarrollarse en pacientes atópicos o en pacientes sensibles al tribromofenato de bismuto.

Indicaciones:

1. Limpie y enjuague la herida con un limpiador de heridas adecuado.
2. Antes de la aplicación, la piel alrededor de la herida debe estar limpia y seca Use una preparación de barrera cutánea, según sea necesario.
3. Usando técnicas asépticas, retire el apósito del paquete y aplíquelo en la herida húmeda.
4. Cubra con un apósito absorbente secundario y asegúrelo según corresponda.
5. Cambie el apósito, según las indicaciones, cuando este se rompa, o al menos cada 7 días.

– Línea de Productos –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Tiras/Caja:
57108	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	1" x 8" (2.5 cm x 20 cm)	50
57202	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	25
57404	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	25
57509	Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále	5" x 9" (12.5 cm x 22.5 cm)	50



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com



No usar si el paquete está dañado



Un solo uso



Mantener seco



Temperatura de almacenamiento



Esterilizado con radiación gamma



Con Receta Únicamente



No fabricado con látex de caucho natural